




滅菌済み単回使用耳鍼

日本製造販売業者：株式会社 Transparence 石川県能美市大成町リ 84 F ビル 2F 0761-58-1817

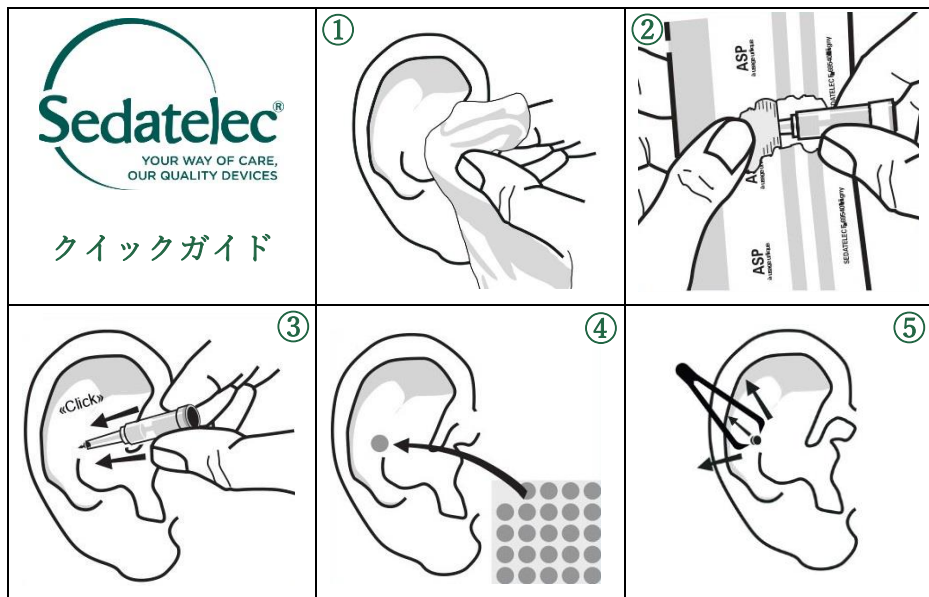

※本デバイスにより発生した重大な事故に関しては、SEDATELEC 社及び日本販売元より所轄省庁に報告しなければなりません。

クイックガイド 解説

- ① 必ず刺鍼部位の皮膚を清拭消毒してください。
- ② 包装からインジェクターを取り出します。
- ③ インジェクターの先端を治療点に当て、皮膚表面まで強く押し込みます。
- ④ 付属の粘着パッチでニードルを保護します。
- ⑤ ピンセットでニードルのしん柄を垂直に引っ張ることで抜鍼が可能です。抜鍼後は、刺鍼部位の消毒を行ってください

- ・ASP ニードルは、医療従事者※が身体に刺激を与えることにより、病的状態からの回復を助けるための手段として使用する、単回使用の医療機器です。※医師及びはり師
- ・このニードルは完全に皮下に埋没させることを意図したものではありません。
- ・保管条件：温度：0℃～40℃、湿度：0%～70%
- ・包装に記載された使用期限を過ぎた ASP ニードルは、使用しないでください。
- ・包装に破れや穴などの破損がある場合は、ASP ニードルを使用しないでください。
- ・外因性発熱物質は含まれていません。

使用上の注意と禁忌

- ・耳介療法の適応でない疾患
- ・妊娠中の女性、血友病患者、または抗凝固薬を服用している患者に使用する場合は、予防措置をとる必要があります。
 ※医師以外は、必要な予防措置をとれないため禁忌とします。
- ・心臓弁膜症患者への使用は避けてください。
- ・刺鍼部位に皮膚感染症がある患者への使用は避けてください。
- ・刺鍼部位に痛みが生じたり炎症を起こしたりした場合は、再来院するように患者へ指示してください。
- ・感染リスクがあるのでニードルの再利用は避けてください。